


Manuel d'Utilisation

Appareil TENS & EMS

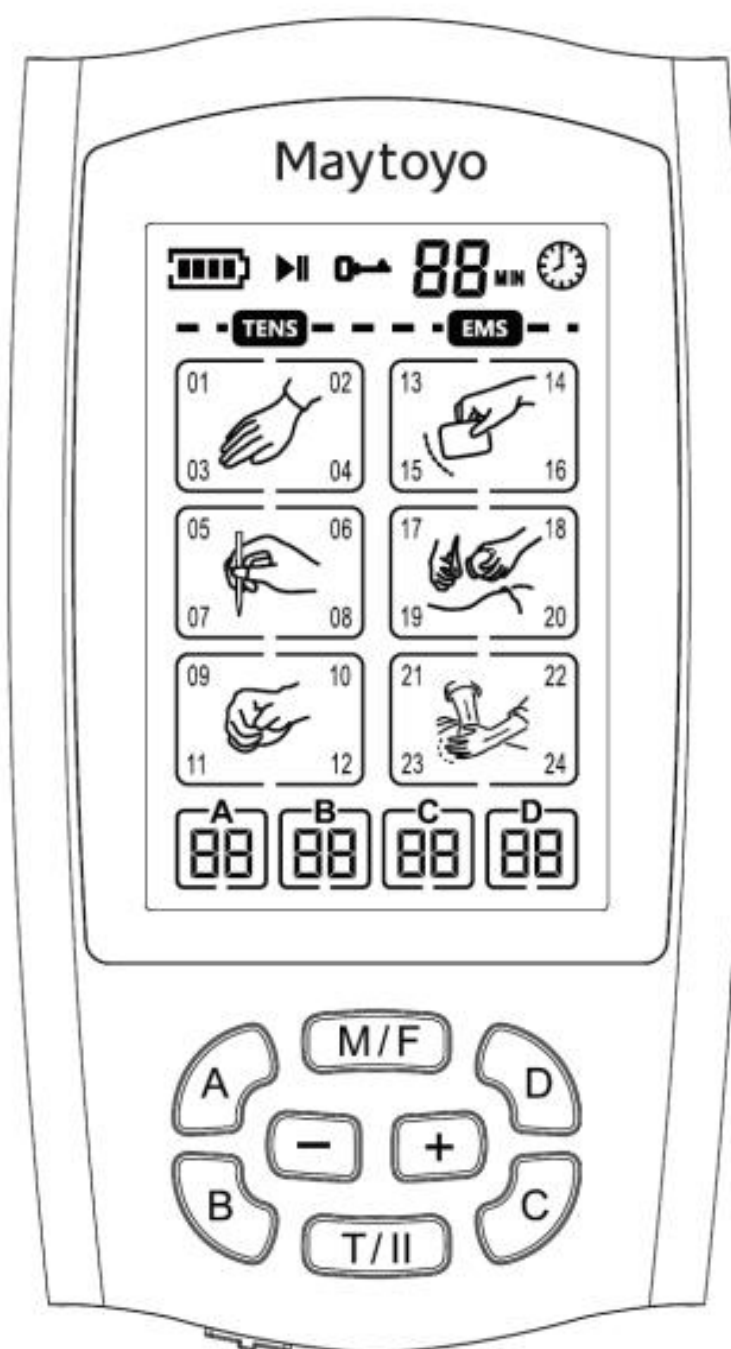

Modèle# FM-B2407

Veuillez lire attentivement ce manuel avant toute utilisation.
Veuillez le conserver pour référence ultérieure.

PROLONGEZ votre garantie de 2 ANS

Visitez le lien ou scannez le code QR et complétez l'enregistrement.

🔍 <http://www.maytoyo.com>



SERVICE CLIENT

✉ support@maytoyo.com


🌐 <http://www.maytoyo.com/>

📘 [@Maytoyo](#)


Veillez télécharger le manuel d'utilisation sur le lien ci-dessous :

🔍 <http://maytoyo.com>


GUIDE RAPIDE

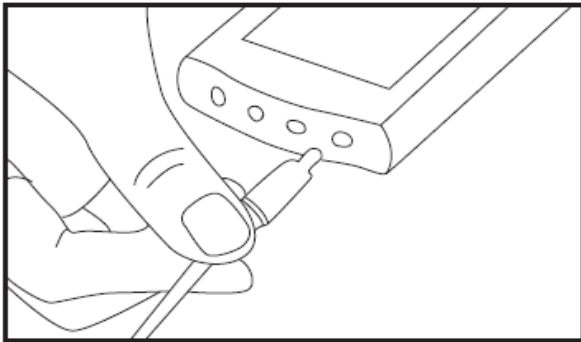


1- Connectez le fil de l'électrode à l'appareil.

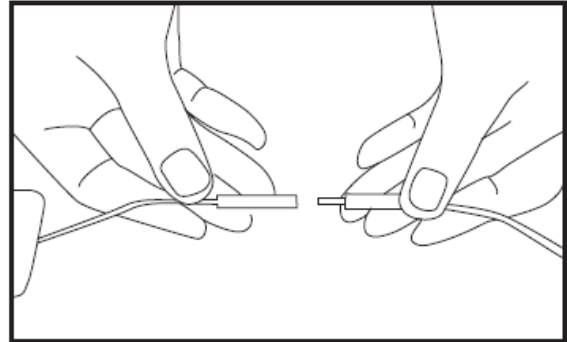


2- Plongez le fil de l'électrode dans les coussinets et arrachez le film protecteur des coussinets.

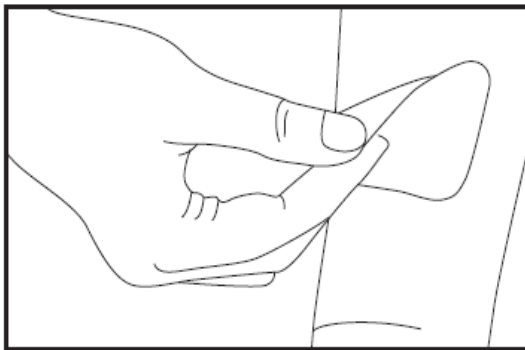


3- Placez les coussinets là où les sensations de massage sont souhaitées. Assurez-vous que votre peau est exempte de saleté et d'eau.

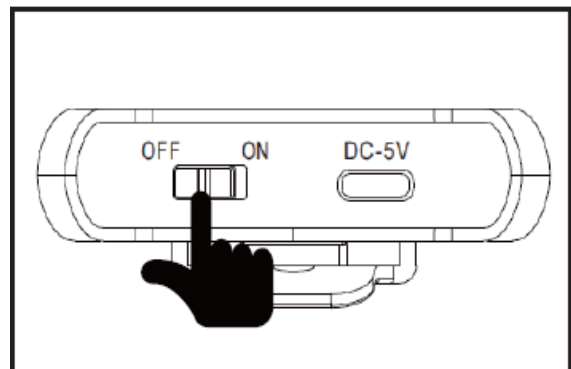


4- Mettez l'appareil TENS en marche en appuyant sur l'interrupteur « ON/OFF » (MARCHE/ARRÊT).

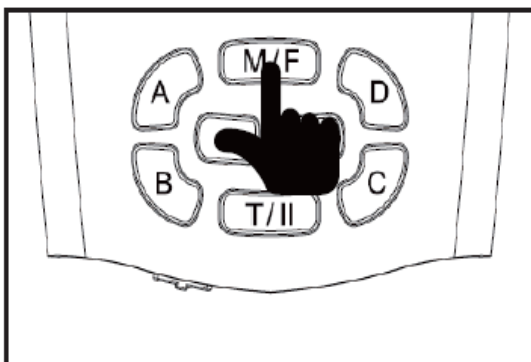


5- Appuyez brièvement sur la touche « M/F » pour changer tour à tour les modes de 1 à 24.

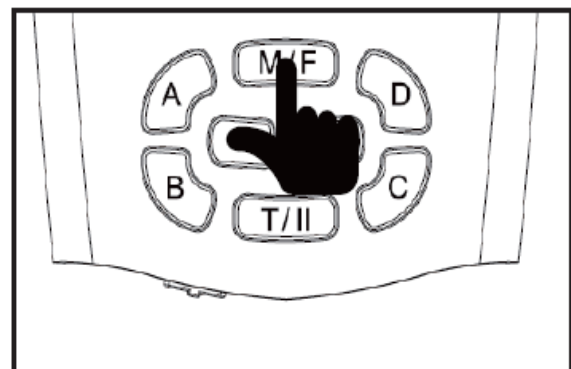


6- Appuyez longtemps sur la touche « M/F » pour basculer rapidement le programme entre TENS et EMS.

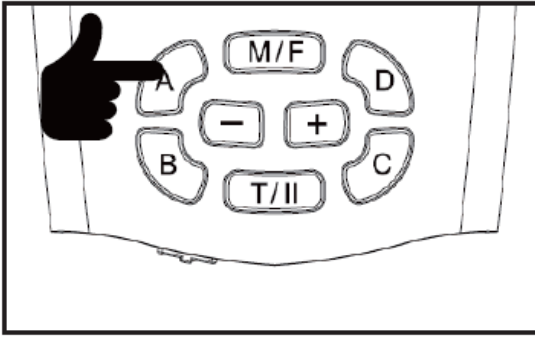


7- Appuyez sur la touche « A » pour choisir le canal A.

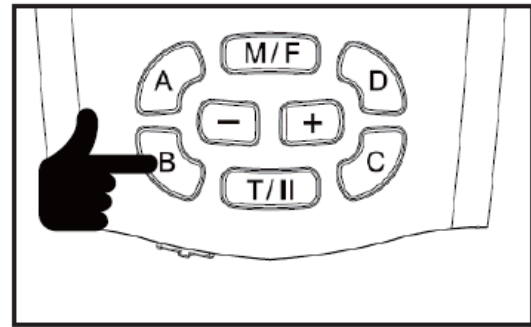


8- Appuyez sur « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer l'intensité du canal A.

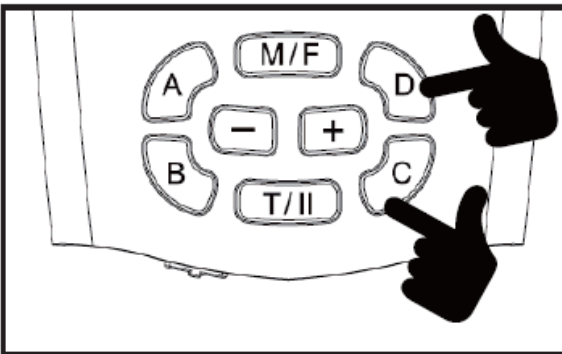


9-Répétez les étapes 7 et 8 pour régler le canal B, le canal C et le canal D si nécessaire.

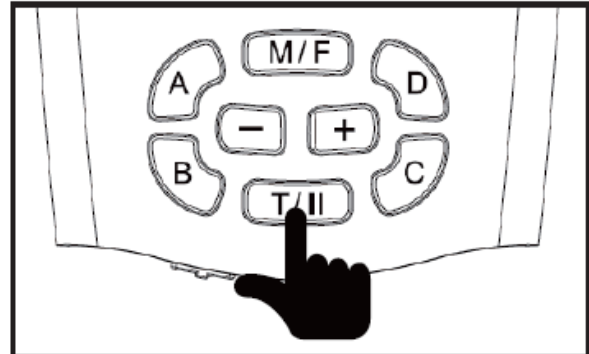

10-Appuyez brièvement sur la touche « T/II » pour régler la durée de 10 à 90 minutes (le minuteur sera augmenté par intervalles de 10 minutes).

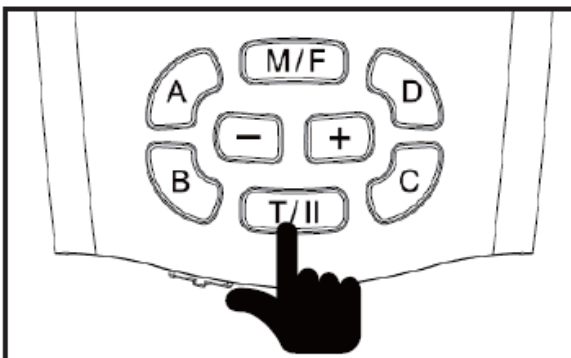

11- Appuyez longtemps sur la touche « T/II » pendant 3 secondes pour mettre en pause tous les états de fonctionnement. Appuyez à nouveau longtemps pour reprendre.

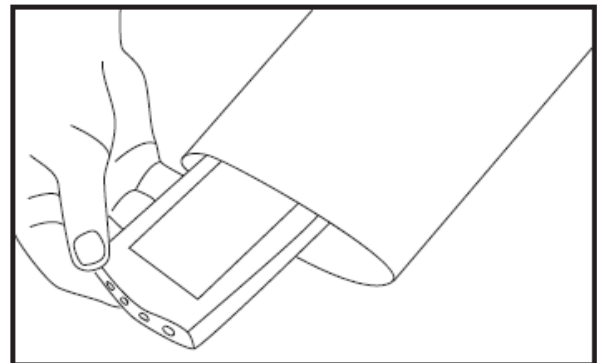

12-Éteignez l'appareil TENS en appuyant sur l'interrupteur « ON/OFF » (MARCHE/ARRÊT), puis retirez les coussinets de votre peau et replacez-les sur le film protecteur. Appuyez à nouveau longtemps pour reprendre.

Table des matières

1. INFORMATION DE SÉCURITÉ	5
1.1 Introduction générale	5
1.2 Contexte médical	5
1.3 Indicateur d'utilisation (IU)	6
1.4 Contre-indications	6
1.5 Avertissements, mises en garde, précautions et effets indésirables	7
1.6 Les Patients	9
1.7 Interférences Electromagnétiques Potentielles et Autres	10
1.8 Explication des chiffres, symboles, avertissements et abréviations figurant sur l'appareil	10
2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL	11
2.1. Illustration de l'appareil	11
2.2 Illustration des accessoires	15
3. SPÉCIFICATION	16
4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	17
5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN	23
5.1 Astuces pour les soins de la peau	23
5.2 Nettoyage de l'appareil	23
5.3 Electrodes	23
5.4 Nettoyage des cordons de l'électrode	24
5.5 Entretien	24
6. DEPANNAGE	27

1. INFORMATION DE SÉCURITÉ

1.1 Introduction générale

Merci d'utiliser notre stimulateur musculaire nerveux. Pour un meilleur usage et pour des raisons de sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel avant votre première utilisation. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation avec votre appareil pour toute référence ultérieure. Ceci est un appareil d'électrothérapie portable, doté de deux modes thérapeutiques : La Neurostimulation Électrique Transcutanée (TENS) et l'Électro-Myo-Stimulation (EMS), qui sont utilisés pour soulager la douleur et stimuler électriquement les muscles. Le stimulateur envoie un courant électrique doux aux nerfs sous-jacents et au groupe musculaire via des électrodes appliquées sur la peau. Les paramètres de l'appareil sont contrôlés par des boutons. Le niveau d'intensité est réglable en fonction des besoins de chaque utilisateur.

1.2 Contexte médical

EXPLICATION DE LA TENS

La Neurostimulation Électrique Transcutanée (TENS) est une méthode non invasive et sans médicament pour contrôler la douleur. La TENS utilise de minuscules impulsions électriques envoyées aux nerfs à travers la peau pour modifier votre perception de la douleur. La TENS ne guérit aucun problème physiologique ; elle permet seulement de contrôler la douleur. La TENS ne fonctionne pas pour tout le monde.

Toutefois, chez la plupart des patients, elle permet de réduire ou d'éliminer la douleur et de reprendre une activité normale.

COMMENT FONCTIONNE LA TENS

L'unité TENS envoie des impulsions confortables à travers la peau qui stimulent le ou les nerfs de la zone de traitement. Dans de nombreux cas, cette stimulation réduit considérablement ou élimine la sensation de douleur ressentie par le patient. Le soulagement de la douleur varie selon le patient, le mode choisi pour le traitement et le type de douleur. Chez de nombreux patients, la réduction ou l'élimination de la douleur dure plus longtemps que la période réelle de stimulation (parfois jusqu'à trois ou quatre fois plus longtemps). Chez d'autres, la douleur n'est modifiée que pendant la durée de la stimulation.

EXPLICATION DE L'EMS

L'Électro-Myo-Stimulation (EMS) est une technique de traitement des blessures musculaires reconnue et éprouvée sur le plan international. Elle fonctionne en envoyant des impulsions électroniques au muscle à traiter, ce qui entraîne un exercice passif du muscle. Cet appareil de basse fréquence, en conjonction avec le modèle d'ondes carrées, permet de travailler directement sur les groupes de muscles. Il est largement utilisé dans les hôpitaux et les cliniques sportives pour le traitement des blessures musculaires et pour la rééducation des muscles paralysés afin de prévenir l'atrophie des muscles affectés, améliorer le tonus musculaire et l'endurance.

COMMENT FONCTIONNE L'EMS

Les unités EMS envoient des impulsions confortables à travers la peau qui stimulent les nerfs de la zone de traitement. Lorsque le muscle reçoit ce signal, il se contracte comme si le cerveau avait envoyé le signal lui-même. Lorsque l'intensité du signal augmente, le muscle se contracte comme lors d'un exercice physique. Lorsque l'impulsion cesse, le muscle se détend et ce cycle est répété jusqu'à la fin du traitement. L'objectif de l'Électro-Myo-Stimulation est d'obtenir des contractions ou des vibrations dans les muscles. L'activité musculaire normale est contrôlée par les systèmes nerveux central et périphérique, qui transmettent des signaux électriques aux muscles. L'EMS fonctionne de manière similaire, mais utilise une source externe (le stimulateur) avec des électrodes fixées sur la peau pour transmettre des impulsions électriques dans le corps. Ces impulsions stimulent les nerfs pour qu'ils envoient des signaux à un muscle spécifiquement ciblé, qui réagit en se contractant, comme dans le cas d'une activité musculaire normale.

1.3 Indicateur d'utilisation (IU)

TENS:

L'appareil est conçu pour être utilisé afin de soulager temporairement la douleur associée aux muscles endoloris des épaules, de la taille, du dos, du cou, des extrémités supérieures (bras), des extrémités inférieures (jambes), de l'abdomen et des fesses en raison d'une tension due à l'exercice ou à des activités ménagères normales.

EMS:

L'appareil est conçu pour être utilisé pour stimuler des muscles sains afin d'améliorer ou de faciliter les performances musculaires.

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Veillez lire le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil. Veillez à respecter toutes les « Contre-indications », « Avertissements », « Mises en garde » et « Effets indésirables » du manuel. Le non-respect des instructions peut causer des dommages à l'utilisateur ou à l'appareil.

1.4 Contre-indications

- 1) Cet appareil ne doit pas être utilisé pour le soulagement symptomatique de la douleur locale, sauf si l'étiologie est établie ou si un syndrome douloureux a été diagnostiqué.
- 2) Cet appareil ne doit pas être utilisé en présence de lésions cancéreuses dans la zone de traitement.
- 3) La stimulation ne doit pas être appliquée sur des zones enflées, infectées, enflammées ou sur des éruptions cutanées (par exemple, phlébite, thrombophlébite, varices, etc).
- 4) Les électrodes ne doivent pas être appliquées sur des zones susceptibles de faire circuler le courant/la stimulation dans la région du sinus carotidien (partie antérieure du cou) ou par voie trans-cérébrale (à travers la tête).

- 5) Les patients porteurs d'un dispositif électronique implanté, tel qu'un stimulateur cardiaque, un défibrillateur implanté ou tout autre dispositif métallique ou électronique, ne doivent pas utiliser cet appareil sans consulter au préalable un médecin.
- 6) Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des zones mal irriguées.
- 7) Cet appareil ne doit pas être utilisé sur des patients présentant de graves problèmes de circulation artérielle dans les membres inférieurs.
- 8) Ce dispositif ne doit pas être utilisé sur des patients souffrant d'une hernie abdominale ou inguinale.
- 9) Les patients souffrant d'une maladie cardiaque, d'épilepsie, d'un cancer ou de tout autre problème de santé ne doivent pas utiliser cet appareil sans consulter au préalable un médecin.

1.5 Avertissements, mises en garde, précautions et effets indésirables

Avertissements

1. Ne appliquer la stimulation que sur une peau normale, intacte, propre et saine.
2. Ne pas appliquer de stimulation dans le bain ou sous la douche.
3. Ne pas appliquer de stimulation pendant le sommeil.
4. Ne pas utiliser cet appareil pendant la grossesse, sauf avis contraire de votre médecin.
5. La stimulation ne doit pas être appliquée sur le cou, la bouche ou les yeux. Des spasmes importants des muscles laryngés et pharyngés peuvent se produire, et les contractions peuvent être suffisamment fortes pour fermer les voies respiratoires ou causer des difficultés à respirer.
6. La stimulation ne doit pas être appliquée sur la poitrine, car l'introduction de courant électrique dans le cœur peut provoquer des arythmies cardiaques.
7. La stimulation ne doit pas être appliquée sur la tête.
8. La stimulation ne doit pas être appliquée sur le nerf sinus carotidien, en particulier chez les patients présentant une sensibilité connue au réflexe du sinus carotidien.
9. Le remplacement d'un composant peut entraîner un risque inacceptable. Veuillez nous contacter si vous avez un quelconque problème avec l'appareil.
10. Gardez cet appareil hors de portée des enfants.
11. Ne rechargez pas, n'utilisez pas et ne laissez pas la batterie et l'appareil dans un environnement à température élevée, par exemple près d'un feu ou en plein soleil. Cela pourrait entraîner une surchauffe, une inflammation ou une rupture de la batterie.

12. La connexion simultanée d'un patient à un équipement chirurgical à haute fréquence et au stimulateur peut présenter un risque potentiel de brûlures et d'endommagement du stimulateur.

13. Le fonctionnement à proximité (par exemple 1m) d'un équipement de thérapie à ondes courtes ou à micro-ondes peut produire une instabilité dans la sortie du stimulateur.

14. Lorsque l'appareil est transféré à un autre patient, remplacez les coussinets utilisés par des coussinets neufs.

15. Evitez autant que possible d'utiliser l'appareil dans les circonstances ou conditions suivantes, car cela pourrait entraîner un fonctionnement incorrect : conversation sur un téléphone portable ; proximité d'une station de base d'émission de signaux pour la radiodiffusion, la télévision, la communication, le radar, la navigation, etc. ; proximité d'un EQUIPEMENT CHIRURGICAL HF actif et de la salle blindée RF d'un SYSTEME ME pour l'imagerie par résonance magnétique.

16. L'utilisation d'accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés ou fournis par le fabricant de l'équipement peut entraîner une augmentation des émissions électromagnétiques ou une diminution de l'immunité électromagnétique de cet équipement et entraîner un fonctionnement incorrect.

17. Les équipements de communication RF portables (y compris les périphériques tels que les câbles d'antenne et les antennes externes) ne doivent pas être utilisés à moins de 30 cm (12 pouces) de toute partie de l'équipement, y compris les câbles spécifiés par le fabricant. Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner une dégradation des performances de cet équipement.

18. L'appareil délivre une densité de courant de 0,612 mA/cm², afin d'atténuer les effets indésirables potentiels :

1) Veuillez ne pas mettre l'appareil sous tension avant de connecter les fils, les coussinets d'électrodes, l'appareil et le corps.

2) Les coussinets d'électrodes ont été collés à la partie appropriée, et l'unité centrale et le fil ont été correctement connectés avant de pouvoir mettre l'appareil sous tension.

3) Pendant l'utilisation normale, ne pas toucher l'hydrogel sur les électrodes, ne pas retirer la fiche du fil, ne pas retirer les électrodes. Toutes ces actions doivent être effectuées après l'arrêt de l'appareil.

Précautions

1. Ce dispositif est destiné à un seul patient.

2. Tenez-vous informé des contre-indications.

3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé sur un patient non surveillé qui n'obéit pas, qui est émotionnellement perturbé, qui est atteint de démence ou qui a un faible QI.

4. Cet appareil ne doit pas être utilisé pendant la conduite automobile, l'utilisation de machines, à proximité de l'eau ou pendant toute activité où des contractions musculaires involontaires peuvent exposer l'utilisateur à un risque excessif de blessure.
5. Ne jamais utiliser l'appareil dans des pièces où des aérosols (sprays) sont utilisés ou de l'oxygène pur est administré.
6. Ne pas utiliser cet appareil en même temps qu'un autre équipement qui envoie des impulsions électriques à votre corps.
7. Ne pas confondre les câbles et les contacts des électrodes avec vos écouteurs ou d'autres appareils, et ne pas connecter les électrodes à d'autres appareils.
8. Ne pas utiliser d'objets pointus tels que des pointes de crayon ou des stylos à bille pour actionner les boutons du panneau de commande.
9. Inspecter les câbles de l'applicateur et les connecteurs associés avant chaque utilisation.
10. Eteindre l'appareil avant d'appliquer ou de retirer les électrodes.
11. Les stimulateurs électriques ne doivent être utilisés qu'avec les fils et les électrodes recommandés par le fabricant.
12. Ne pas l'utiliser en présence d'une atmosphère explosive ou d'un mélange inflammable.

Effets indésirables

1. Réactions allergiques potentielles dues à la stimulation électrique ou au gel, notamment irritation de la peau, rougeur, brûlure ou hypersensibilité. En cas d'irritation cutanée, cessez l'utilisation et consultez votre médecin.
2. L'inconfort est dû à des niveaux de stimulation inappropriés, réduisez l'intensité de la stimulation ou éteignez directement l'appareil.
3. Maux de tête et autres sensations douloureuses pendant ou après l'application de la stimulation électrique près des yeux, de la tête et du visage.

***Vous devez arrêter d'utiliser l'appareil et consulter votre médecin si vous ressentez des effets indésirables.

1.6 Les Patients

Le « patient » est un utilisateur potentiel.

Les adultes qui souffrent de douleurs musculaires au niveau des épaules, de la taille, du dos, du cou, des extrémités supérieures (bras) et des extrémités inférieures (jambes) en raison d'une tension due à l'exercice ou à des activités domestiques normales peuvent utiliser ce dispositif.

Cependant, il ne doit pas être utilisé par les enfants, les femmes enceintes ou toute personne ayant un dispositif métallique implanté. Consultez votre médecin si vous avez des questions relatives à votre santé.

Notes

1. Cette partie concerne les informations relatives à la sécurité. Elle est destinée à vous aider à utiliser l'appareil en toute sécurité, à prévenir les blessures et à éviter les situations susceptibles d'endommager l'appareil. Il est important que vous lisiez attentivement ces informations.
2. Veuillez noter que les accessoires originaux reconnus, les pièces détachables et les matériaux sont approuvés par la norme.
3. Veuillez noter que l'adaptateur que vous choisissez pour le chargement de la batterie doit être conforme aux normes ANSI/AAMI/ES60601-1 ou IEC 60950.






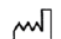


1.7 Interférences Electromagnétiques Potentielles et Autres

Ce produit est sensible aux interférences électromagnétiques, et les cas suivants peuvent interférer avec une utilisation normale :

- Lorsque vous parlez au téléphone.
- Près d'une station de base pour la transmission de signaux (diffusion, télévision, communications, radar, navigation, etc.)
- Près d'instruments médicaux à haut rayonnement tels que la résonance magnétique nucléaire.


L'opérateur doit s'éloigner de l'équipement dès que possible si ses performances essentielles sont affectées en raison de PERTURBATIONS ELECTROMAGNETIQUES. Les performances essentielles de l'équipement doivent être rétablies. Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter votre revendeur local.

1.8 Explication des chiffres, symboles, avertissements et abréviations figurant sur l'appareil

Signification des symboles utilisés pour le marquage décrit dans le mode d'emploi	
	Mise en garde!
	Type de partie appliquée BF
	Courant continu
IP22	Protection contre les corps étrangers solides de 12,5 mm et plus ; Protection contre les gouttes d'eau tombant verticalement lorsque le BOITIER est incliné jusqu'à 15°.v
	Se référer au manuel d'instruction
	Numéro de série
	Date de fabrication
	Informations sur la fabrication
	Étiquette WEEE

2. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

2.1. Illustration de l'appareil

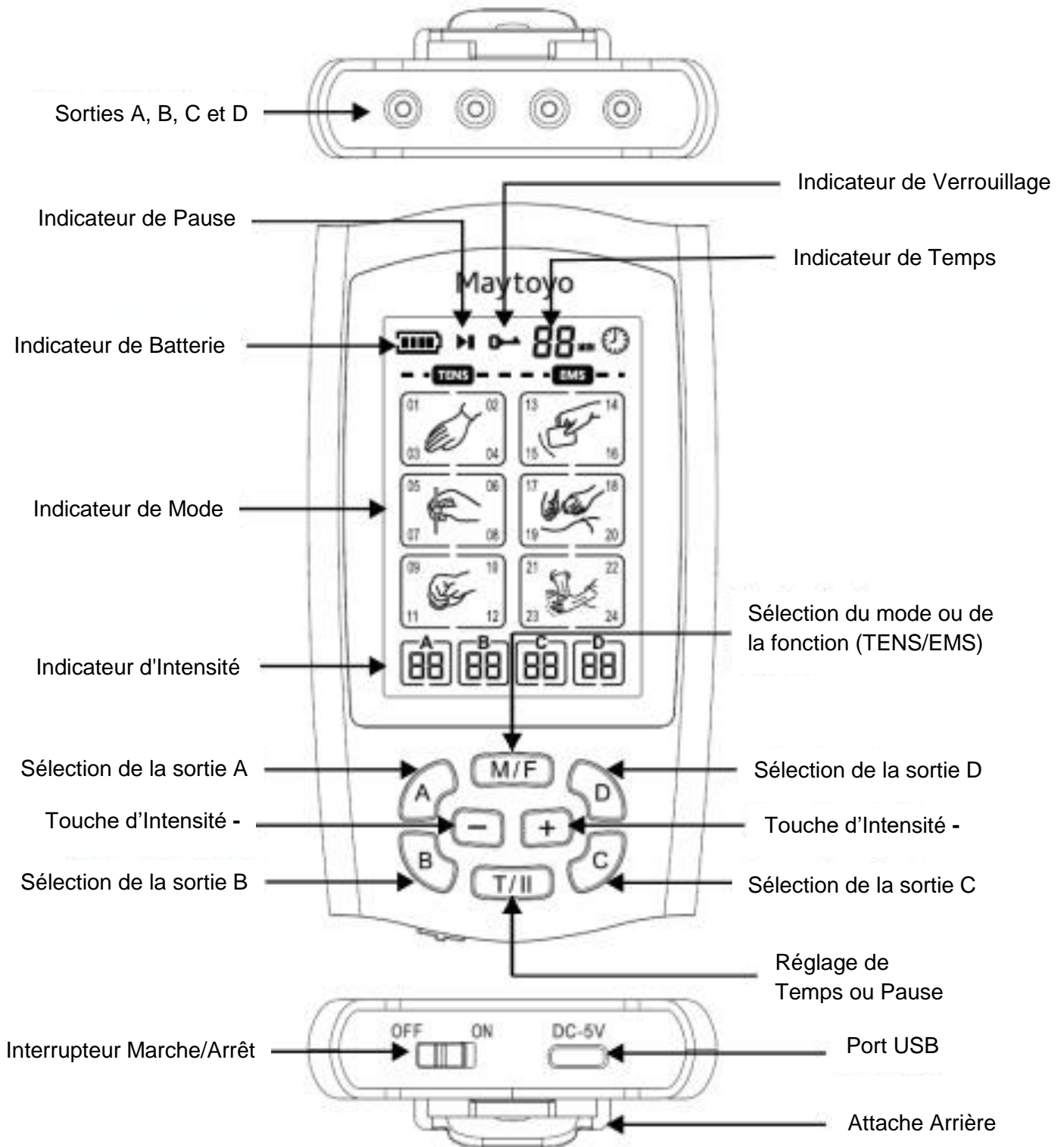

Interrupteur Marche/Arrêt : Lorsque l'interrupteur est en position « ON » (MARCHE), l'appareil est mis en marche, et lorsqu'il est en position « OFF » (ARRÊT), l'appareil est éteint.

Port USB : Port de connexion de l'adaptateur secteur, lorsque utilisé pour la charge, interface entre le câble de charge et l'appareil.

Indicateur de Batterie : Utilisé pour l'affichage du niveau de la batterie. Lorsque la batterie est sur le point de se décharger, un symbole de batterie clignotant s'affiche à l'écran. Elle doit être rechargée dès que possible. Toutefois, en fonction des réglages et du niveau d'intensité, la machine peut continuer à fonctionner pendant une période plus longue.


Indicateur de Temps : Affiche le temps de travail restant après la mise sous tension (Min).
Indicateur de programme TENS ou EMS : Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton M/F, le programme TENS ou EMS peut être sélectionné.

Indicateur de mode : Il y a 24 modes au total, et les modes 1 à 12 sont des programmes TENS, les modes 13 à 24 sont des programmes EMS.


Lorsque le programme TENS est en cours, vous appuyez brièvement sur la touche M, le numéro de mode +1 (par exemple de mode 1 à mode 2) jusqu'à mode 12.


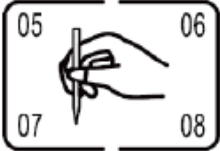

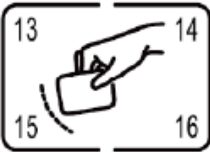
Lorsque le programme EMS est en cours, appuyez brièvement sur la touche M, le numéro de mode +1 (par exemple de mode 13 à mode 14) jusqu'à mode 24.

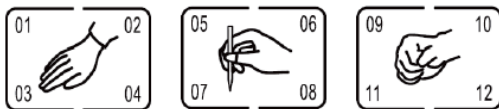

Il existe 12 programmes TENS :

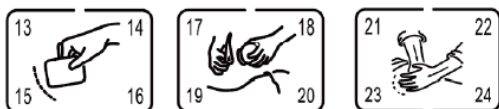

Il existe 12 programmes EMS :



	01	Shiatsu	Shiatsu est une simulation d'un type de pression des doigts et des paumes, d'étirements et d'autres techniques de massage.
	02	Tuina	La simulation du Tuina est un traitement corporel manuel qui aide à soulager la douleur et à se détendre.
	03	Main	Stimulez les points douloureux de la zone de la main pour soulager la douleur ou détendre les muscles.
	04	Pétrissage	Il s'agit d'un type de médecine alternative consistant en des pressions des doigts et des paumes, des étirements et d'autres techniques de massage.
	05	Acupuncture	La simulation d'acupuncture procure la même sensation sans aiguilles, en utilisant des impulsions électroniques pour obtenir la sensation de différentes profondeurs d'aiguilles.
	06	Perte de poids	Combinaison d'acupuncture. Elle permet de perdre du poids ou de tonifier, renforcer et raffermir les muscles des abdominaux, du dos, des cuisses et des bras, etc.
	07	Réflexologie	Stimulez les points douloureux de la zone du corps pour soulager la douleur ou détendre les muscles.
	08	Acupuncture	La stimulation avec un réglage de basse fréquence procure à l'utilisateur une sensation de grattage et de pétrissage.
	09	Taraudage	Le taping stimulant est destiné à produire une sensation de coup dur qui masse vos muscles, ce qui peut vous donner une sensation de revigoration et de revitalisation.
	10	Acupuncture	Stimulez les points douloureux de la région de l'épaule pour soulager la douleur ou détendre les muscles.
	11	Pression	Il s'agit de la manipulation des couches superficielles et profondes des muscles et du tissu conjonctif à l'aide de diverses techniques.
	12	Pied	Stimulez les points douloureux de la zone du pied pour soulager la douleur ou détendre les muscles.
	13	Guasha	Stimule la circulation pour mettre fin à la stase, réchauffe les canaux pour soulager la douleur.
	14	Hanche	Stimulez les points douloureux de la hanche, le nerf sciatique pour soulager la douleur ou détendre les muscles.
	15	Genou	Stimule les points douloureux de la région du genou pour soulager la douleur et détendre les muscles.
	16	Cheville	Stimulez les points douloureux spécifiquement dans la cheville pour soulager la douleur ou détendre les muscles.
	17	Ventouse	Imitez la sensation de succion créée sur la

			peau. La ventouse est une thérapie traditionnelle chinoise qui consiste à appliquer des coupelles de verre chauffées sur la peau, créant ainsi une aspiration afin de stimuler le flux d'énergie.
	18	Hanche	Stimule les points douloureux de la zone lombaire pour soulager la douleur ou détendre les muscles.
	19	Coude	Stimule les points douloureux de la zone du coude pour soulager la douleur ou détendre les muscles.
	20	Dos	Stimule les points douloureux de la zone lombaire pour soulager la douleur ou détendre les muscles.
	21	Combinaison	Combinaison aléatoire des modes de base. Détente complète du corps après une séance d'entraînement, exercices et remise en forme après une dure journée de travail.
	22	Massage des Tissus Profonds	Stimule les points douloureux de la région du genou pour soulager la douleur et détendre les muscles.
	23	Massage de la Fibrillation	J'aide à la réduction musculaire, à la relaxation des spasmes musculaires, à l'augmentation de l'amplitude de mouvement, à la récupération des blessures après une chirurgie.
	24	Mélange	Combinaison aléatoire des modes de base. Détente complète du corps après une séance d'entraînement, exercices et remise en forme après une dure journée de travail.

Indicateur d'Intensité (A, B, C et D) : A indique uniquement l'intensité du canal A, B indique uniquement l'intensité du canal B, C indique uniquement l'intensité du canal C, D indique uniquement l'intensité du canal D. Lorsque vous cliquez à plusieurs reprises sur la touche A, B, C ou D, l'indicateur d'intensité A, B, C ou D change et clignote.

Bouton M : Appuyez sur la touche M/F. Touche de sélection du mode. Lorsque le type de mode est déterminé (Réglage du mode), vous pouvez sélectionner le mode spécifique en appuyant sur le bouton M.

Bouton F : Touche de sélection TENS ou EMS. Le programme TENS est sélectionné par défaut au démarrage, et une pression longue (3 secondes) sur le bouton M/F permet de passer au programme EMS.


Bouton +/- : Touche de réglage de l'intensité. Sélectionnez le canal A par le bouton A, puis appuyez une fois sur la touche +, l'intensité augmentera d'une unité, et appuyez une fois sur la touche -, l'intensité diminuera d'une unité. La sortie A, la sortie B, la sortie C et la sortie D sont les mêmes.

Bouton Pause : Utilisé pour mettre l'appareil en pause pendant son utilisation, appuyez longtemps sur la touche T/II.

Bouton T : Utilisé pour ajuster le temps de travail de l'appareil. Appuyez brièvement sur le bouton T/II, le temps par défaut est de 30 minutes et les utilisateurs peuvent ajuster le temps par le bouton T, il peut être choisi 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, jusqu'à 90 minutes.

Bouton A, B, C et D : A est la prise de sortie A, sortie du signal électrique après connexion du câble avec les électrodes adhésives canal A, canal B, canal C ou canal D.

2.2 Illustration des accessoires

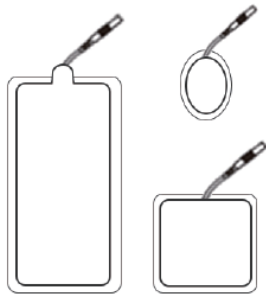

Coussinets d'électrodes



Fils d'alimentation



câble USB

Caractéristiques de l'appareil

- Affichage LCD
- Rétro-éclairage
- 4 canaux indépendants
- Minuteur réglable jusqu'à 90 minutes
- 24 modes de fonctionnement différents
- Batterie polymère interne rechargeable
- 30 niveaux d'intensité
- Permet d'appliquer 2 à 8 coussinets sur les différentes zones ciblées en même temps.
- 4 sorties sont isolées, donc A, B, C ou D ont la même puissance à 100%
- Partie appliquée : coussinets d'électrodes auto-adhésifs

Informations importantes

Des capteurs et des électrodes dégradés, ou des électrodes desserrées, peuvent dégrader les performances ou provoquer d'autres problèmes de sécurité.

Inclus dans ce package

- Appareil Tens à 4 canaux x 1 unité
- Coussinets ovales x 2 unités
- Coussinets carrés x 8 unités
- Coussinets rectangulaires x 2 unités
- Fil électrique x 4 unités
- Câble USB x 1 unité
- Manuel d'instruction x 1 unité
- Sac de rangement x 1 unité

3. SPÉCIFICATION

Puissance

Tension d'entrée : 5V D.C.

Courant nominal : $\leq 50\text{mA}$

Puissance nominale : $\leq 0,25\text{W}$

Batterie Li-ion : 3,7 V DC

4. INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Comment utiliser l'appareil

1. Conditions environnementales de fonctionnement : Température : -5 / +40°C
Humidité : Ne dépasse pas 85%. Pression atmosphérique de 800 hPa à 1060 hPa
2. Veuillez-vous assurer que l'appareil est sur la position OFF (ARRÊT) lors de l'installation de l'appareil, du réglage des coussinets ou d'une nouvelle connexion.
3. N'allumez pas l'appareil avant de placer les coussinets sur votre peau.

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez contrôler des points suivants :

1. Vérifiez que les fils de l'électrode ne sont pas endommagés ou irréguliers.
2. Vérifiez que les électrodes ne sont pas endommagées ou irrégulières.
3. Vérifiez l'absence de dommages physiques sur l'appareil.

Étape 1 : Connectez l'électrode à l'appareil

Le FM-B2407 est équipé de quatre canaux isolés A&B&C&D. Cela vous permettra de définir des modes et des intensités distincts sur chaque canal en utilisant les 4 sorties A, B, C et D. Avant de connecter les fils à l'appareil, décidez du canal que vous souhaitez utiliser (canal A, B, C ou D). Pour utiliser le canal A uniquement, connectez le(s) fil(s) d'électrode aux sorties A. Pour utiliser les deux canaux A, B, connectez les fils d'électrode à toutes les sorties. Les sorties B, C et D sont les mêmes que pour le canal A.

1. Branchez le fil de l'électrode sur la sortie située en bas de l'appareil. En fonction de vos besoins, vous pouvez utiliser une, deux, trois ou quatre sorties.
2. Assurez-vous que les fils de l'électrode sont complètement insérés dans la sortie et bien fixés. Assurez-vous que les fils ne sont pas lâches. Une connexion lâche réduira la puissance de sortie de votre appareil, ce qui peut entraîner une connexion peu fiable.
3. Répétez les étapes 1 et 2 pour connecter un autre fil.

MISE EN GARDE:


1. N'insérez pas la fiche du fil conducteur du patient dans une prise d'alimentation en courant alternatif.

Etape 2 : Connectez les électrodes aux fils.

1. Chaque fil a deux conduits avec des connecteurs à broche. Insérez les connecteurs des fils dans les plots. Assurez-vous qu'au moins une paire (2 pièces) de coussinets est attachée au même fil. Une plaquette seule ne fonctionnera pas.
2. Assurez-vous qu'au moins une paire de coussinets est attachée au même fil.
3. Vérifiez les connexions des broches pour vous assurer qu'elles sont bien fixées.



Câbles de connexion

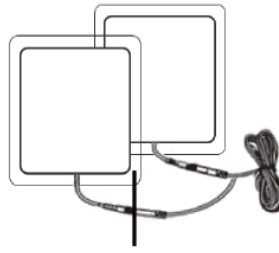

Film transparent

MISE EN GARDE

1. Veuillez- vous assurer que l'appareil est sur la position OFF (ARRÊT) lors de l'installation de l'unité, du réglage des coussinets ou d'une nouvelle connexion.
2. N'ALLUMEZ PAS l'appareil avant d'avoir mis les coussinets sur votre peau.
3. Utilisez au moins une paire de coussinets. Un seul coussinet ne fonctionnera pas.

Étape 3 : Placez les électrodes sur la peau

Appliquez les électrodes sur le site exact indiqué Avant d'appliquer les électrodes, assurez-vous que la surface de la peau sur laquelle les électrodes sont placées est bien nettoyée et sèche. Assurez-vous que les électrodes sont fermement pressées sur la peau et que le contact entre la peau et les électrodes est bon. Placez les électrodes sur la peau et fixez-les correctement, fermement et uniformément.

1. Retirez les films plastiques sur les coussinets.
2. Vérifiez que la face adhésive du coussinet est propre après avoir retiré le film plastique.
3. Placez les coussinets sur le muscle que vous souhaitez traiter. Assurez-vous que votre peau a été nettoyée de toute saleté, huile ou lotion.
4. Veillez à placer le côté adhésif du coussinet sur votre peau.
5. Nous vous recommandons de conserver les films plastiques pour stocker les coussinets après usage.
6. Assurez-vous d'utiliser au moins une paire de coussinets sur le même fil en même temps.
7. Assurez-vous que les coussinets sont bien collés sur votre peau.

MISE EN GARDE

1. Ne pas superposer les électrodes ni placer une électrode sur une autre.
2. Ne jamais retirer les électrodes auto-adhésives de la peau lorsque l'appareil est allumé. Vous ressentiriez une décharge électrique désagréable.

Positionnement des électrodes

Le placement des électrodes peut être l'un des paramètres les plus importants pour le succès de cette thérapie. La volonté du médecin d'essayer différents styles de placement des électrodes pour trouver la méthode la plus adaptée aux besoins de chaque patient est de la plus haute importance. Une fois qu'un emplacement acceptable a été obtenu, il faut marquer les sites d'électrodes et les réglages de l'appareil, afin que le patient puisse facilement poursuivre le traitement sur ces sites.

Étape 4 : Allumez l'appareil

Poussez l'interrupteur « ON/OFF » (MARCHE/ARRÊT) situé sur la partie inférieure de l'appareil en position ON (MARCHE).

Vérifiez l'indicateur de canal sur l'écran pour vous assurer que l'appareil est sur le même canal que celui que vous souhaitez utiliser. La lettre « A » clignote pour indiquer que le canal A est en fonctionnement. La lettre « B » clignote pour indiquer que le canal B est en fonctionnement, et C ou D est identique à A et B.

MISE EN GARDE:

1. Avant la première utilisation, il est fortement conseillé de prendre connaissance des contre-indications et des mesures de sécurité détaillées au début de ce manuel (Informations de sécurité), car cet équipement puissant n'est ni un jouet ni un gadget.

Étape 5 : Sélectionnez les modes et l'intensité

Une fois l'appareil allumé, il affichera toutes les icônes pendant 1 seconde pour s'assurer que toutes les icônes s'affichent correctement. L'appareil se règle automatiquement sur le canal A, mode 1, avec une intensité nulle.

Pour sélectionner le programme TENS ou EMS, appuyez longuement sur la touche M/F une fois, le programme TENS ou EMS peut être sélectionné.

Comme mentionné précédemment, cet appareil est équipé de 4 canaux isolés A, B, C et D. Vous devrez sélectionner le mode et l'intensité pour le canal que vous souhaitez utiliser. Une fois que l'appareil est allumé, il affiche toutes les icônes pendant une seconde pour s'assurer que toutes les icônes s'affichent correctement. L'appareil se règle automatiquement sur le canal A, mode 1, avec une intensité nulle.

Pour sélectionner le programme TENS ou EMS, appuyez longuement sur le bouton M/F une fois, le programme TENS ou EMS peut être sélectionné.

Comme mentionné précédemment, cet appareil est équipé de 4 canaux isolés A, B, C et D. Vous devrez sélectionner le mode et l'intensité pour le canal que vous souhaitez utiliser. Vous avez la possibilité d'utiliser le canal seul ou les deux canaux ou plus.

MISE EN GARDE

1. Les modes suivants sont des programmes TENS : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, et les 12 autres modes sont des programmes EMS : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.
2. Vous pouvez également consulter votre médecin pour connaître le mode thérapeutique qui vous convient.

Réglage TENS

Lorsque vous sélectionnez le programme TENS, vous devez choisir l'un des modes suivants sur l'écran : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12.

Lorsque vous sélectionnez le programme TENS dont vous avez besoin, le programme thérapeutique apparaît. Le temps de cycle, le temps thérapeutique, la largeur d'impulsion et la fréquence d'impulsion sont tous par défaut dans cet appareil.

1. Positionnement des électrodes : Les deux extrémités de la zone douloureuse, à 3-5 cm de la zone douloureuse ou directement sur la zone douloureuse.
2. À quelle fréquence utiliser la stimulation ? Après la fin d'une stimulation, il est recommandé d'attendre 30 minutes avant de procéder à la stimulation suivante.
3. Combien de temps faut-il utiliser les programmes/modes ? Il est recommandé de ne pas dépasser 180 minutes par jour.
4. À quelle fréquence les traitements doivent-ils être effectués ? Il est recommandé de consulter un médecin.
5. Combien de temps faut-il pour que le soulagement de la douleur se produise pendant une séance de traitement ? En général, un effet de soulagement de la douleur se produit dans un court laps de temps (comme 3 à 5 minutes) après l'utilisation. Si la douleur n'est pas soulagée après plus de 30 minutes d'utilisation, veuillez consulter un médecin à temps.

Réglage de l'EMS

Lorsque vous sélectionnez le programme TENS, vous devez choisir l'un des modes suivants : 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.

Lorsque vous sélectionnez le programme EMS dont vous avez besoin, le programme thérapeutique, le temps de cycle, le temps thérapeutique, la largeur d'impulsion et la fréquence d'impulsion sont tous par défaut dans cet appareil.

1. Positionner les électrodes pour obtenir une contraction optimale : Afin d'obtenir la meilleure contraction pour la stimulation musculaire, veuillez placer les électrodes directement sur la partie la plus large du muscle que vous souhaitez stimuler ou sur les extrémités du muscle que vous souhaitez stimuler.

2. Lorsque vous commencez un programme d'exercices, nous vous conseillons d'utiliser la stimulation deux fois par jour, et 30-60 minutes une fois.
3. Combien de temps faut-il utiliser la stimulation ? Dans la plage d'intensité qui vous convient, nous vous recommandons de ne pas dépasser 80 minutes à chaque fois.
4. Quand augmenter la stimulation ? Après vous être adapté à l'intensité de la stimulation, vous pouvez augmenter lentement l'intensité de la stimulation en fonction de vos besoins d'exercice.
5. Quand augmenter l'utilisation des programmes/modes pour améliorer la performance musculaire ? Cela peut être dans les cas suivants :
 - 1) Détente des spasmes musculaires.
 - 2) Augmentation de la circulation sanguine.
 - 3) Prévention de l'atrophie due à la désuétude.
 - 4) Rééducation musculaire.
 - 5) Maintien ou augmentation de l'amplitude de mouvement.
- 6) Quels programmes/modes doivent être utilisés dans chaque séance d'exercice ? Vous pouvez choisir n'importe quel mode parmi les 5 proposés.
- 7) Comment utiliser chaque programme/mode lors de l'augmentation du régime d'exercices ? Lorsque vous voulez augmenter le régime d'exercice, vous pouvez choisir le mode approprié en fonction de votre expérience de stimulation. À ce moment-là, le facteur le plus décisif est l'intensité.

Réglez l'intensité du canal A :

1. Sélectionnez le bouton A, puis appuyez brièvement sur le bouton M/F pour sélectionner le mode souhaité, le mode sélectionné clignote.

Remarque : appuyez longuement sur le bouton M/F pour sélectionner les fonctions entre TENS et EMS, vous pouvez passer du mode actuel au premier mode de la fonction, par exemple, si vous êtes actuellement en mode 3 de TENS, appuyez longuement sur le bouton M/F pour passer rapidement au mode 13 de EMS.

2. Appuyez sur la touche d'intensité « + » pour augmenter l'intensité. Lorsque vous changez de mode, le niveau d'intensité se remet automatiquement à zéro, il est nécessaire de répéter le réglage de l'intensité.
3. Continuez à augmenter l'intensité en appuyant sur le bouton d'augmentation de l'intensité pour obtenir le niveau souhaité.

Réglez l'intensité des canaux B, C et D :

C'est la même chose que de régler l'intensité du canal A, pour sélectionner d'abord le bouton de sélection de sortie correspondant.

Mise en garde

1. Nous vous recommandons de commencer par le niveau d'intensité le plus faible et d'augmenter progressivement jusqu'à un niveau confortable.
2. L'intensité doit être réglée à un niveau tel que vous ressentirez des vibrations musculaires et des mouvements musculaires involontaires.
3. Si les niveaux de stimulation sont inconfortables ou le deviennent, réduisez l'intensité de la stimulation à un niveau confortable et contactez votre médecin si les problèmes persistent.

Étape 6 : Réglez le minuteur

Appuyez brièvement sur la touche T/II, la minuterie augmente par incréments de 10 minutes. Appuyez sur l'heure (chiffre affiché) pour régler la minuterie de 10 minutes à 90 minutes. Continuez d'appuyer sur l'heure pour régler la minuterie sur 90 minutes.

Étape 7 : Pause

Appuyez longuement (3 secondes) sur le bouton T/II pour mettre en pause tous les états de fonctionnement, appuyez longuement à nouveau pour reprendre.

Étape 8 : Éteignez l'appareil

Poussez l'interrupteur « ON/OFF » (MARCHE/ARRÊT) situé au bas de l'appareil sur la position OFF (ARRÊT).

Étape 9 : Retirez les coussinets de votre peau.

Retirez lentement les coussinets de votre peau et replacez-les sur le support de coussinets fourni ou sur le film plastique de protection.

Mise en garde

NE PAS retirer les coussinets avant d'avoir éteint l'appareil.

Étape 10 : Retirez les coussinets des fils. Débranchez les fils de l'appareil.

Entretenez l'appareil conformément aux exigences d'entretien.

5. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

5.1 Astuces pour les soins de la peau

Suivez ces suggestions pour éviter toute irritation de la peau, surtout si vous avez une peau sensible :

1. Lavez la zone de la peau sur laquelle vous allez placer les électrodes avec du savon. Rincez abondamment et séchez complètement la zone avant et après la pose des électrodes. 2.
2. Les poils superflus peuvent être coupés avec des ciseaux ; ne rasez pas la zone de stimulation.
3. De nombreux problèmes de peau sont dus à la « tension de traction » des patchs adhésifs qui sont excessivement tendus sur la peau pendant l'application. Pour éviter cela, appliquez les électrodes du centre vers l'extérieur ; évitez de les étirer sur la peau.
4. Pour minimiser le « stress de traction », fixez des longueurs supplémentaires de fils conducteurs sur la peau en formant une boucle pour éviter de tirer sur les électrodes.
5. Lorsque vous retirez les électrodes, tirez toujours dans le sens de la pousse du poil.
6. Il peut être utile d'appliquer une lotion cutanée sur la zone où se trouvent les électrodes pendant les périodes d'arrêt du traitement, lorsque vous ne portez pas d'électrodes.
7. N'appliquez jamais les électrodes sur une peau irritée ou abîmée.

5.2 Nettoyage de l'appareil

1. Retirez la batterie de l'appareil avant de le nettoyer.
2. Après utilisation, nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et légèrement humide.
3. N'utilisez pas de nettoyants chimiques ou d'agents abrasifs pour le nettoyage.

5.3 Electrodes

1. Utilisez cet appareil uniquement avec les fils et les électrodes fournis par le fabricant. Utilisez uniquement les placements d'électrodes et les réglages de stimulation prescrits par votre médecin ou votre thérapeute.
2. Inspectez vos électrodes avant chaque utilisation. Remplacez les électrodes si nécessaire. Les électrodes réutilisables peuvent provoquer une légère irritation de la peau, perdre leurs propriétés d'adhérence et fournir moins de stimulation si elles sont trop utilisées.
3. Les informations relatives à la commande des électrodes : Disponibles à l'achat sur Amazon, Alibaba et d'autres plateformes de commerce électronique. Il précise le fabricant des électrodes, le fabricant est GMDASZ Manufacturing Co., Ltd.
4. Le type d'électrode : C'est un type d'hydrogel, et c'est un type de silicone médical.

5. Le type de connecteur sur l'électrode : Pin-in.

Avertissement :

1. La taille, la forme et le type d'électrode peuvent affecter la sécurité et l'efficacité du traitement et le risque associé à l'utilisation d'une électrode de mauvaise taille est la brûlure thermique.
2. Nous vous conseillons de vous procurer des électrodes de remplacement qui sont du même type, ont les mêmes dimensions et les mêmes connecteurs que celles distribuées avec votre appareil.

POUR UTILISER LES ÉLECTRODES :

1. Fixez l'électrode au fil conducteur.
2. Retirez le support de protection de la surface de l'électrode. Ne jetez pas le support de protection car il peut être réutilisé après la séance de traitement.
3. Placez la surface collante sur la zone de peau prescrite en appuyant fermement l'électrode contre la peau.

POUR ENLEVER VOS ÉLECTRODES :

1. Soulevez le coin de l'électrode et la retirer délicatement de la peau.
2. Il peut être utile d'améliorer l'application répétée de l'électrode en étalant quelques gouttes d'eau froide sur la face adhésive et en retournant la surface pour la faire sécher à l'air libre. Une saturation excessive en eau réduira les propriétés adhésives.
3. Entre deux utilisations, replacez les électrodes dans le manchon de protection, insérez-les dans le sac refermable et conservez-les dans un endroit froid et sec.

MISE EN GARDE:

1. Ne pas tirer sur le fil de l'électrode car cela pourrait l'endommager.
2. Les électrodes doivent être jetées lorsqu'elles n'adhèrent plus à la peau.

5.4 Nettoyage des cordons de l'électrode

Nettoyez les cordons des électrodes en les essuyant avec un chiffon humide. En les enduisant légèrement de talc, vous réduirez les enchevêtrements et prolongerez leur durée de vie.

5.5 Entretien

1. L'entretien et toutes les réparations doivent être effectués uniquement par une agence autorisée. Le fabricant ne sera pas tenu responsable des résultats de l'entretien ou des réparations effectués par des personnes non autorisées.

2. L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil ou ses accessoires. Veuillez contacter le détaillant pour toute réparation.
3. L'ouverture de l'appareil par des organismes non autorisés n'est pas permise et mettra fin à tout droit à la garantie.
4. Vérifiez l'appareil avant chaque utilisation pour détecter les signes d'usure et/ou de dommages. Remplacez les éléments usés si nécessaire.
5. Veuillez nettoyer fréquemment la machine principale. Utilisez un morceau de tissu doux et sec pour essuyer la saleté sur la machine principale. Ne pas laver à l'eau ou nettoyer avec un détergent, un diluant, une huile volatile, etc. qui contient des substances chimiques.
6. La surface en gel du coussinet de massage doit être maintenue propre et éviter la saleté comme la poussière, les substances huileuses, les substances collantes, etc.
7. Veuillez remettre les coussinets de massage dans leurs supports ou coller les films de protection sur les coussinets après utilisation.
8. Lorsque l'adhérence du coussin de massage devient faible à cause de la saleté ou s'il y a une sensation de picotement dans la peau, veuillez utiliser un morceau de tissu humide trempé dans un peu d'eau pour essuyer doucement la surface du gel. Après séchage, l'adhérence se rétablira, mais si vous utilisez trop d'eau, l'adhérence diminuera.
9. N'essuyez pas la surface du gel avec une serviette en papier.
10. Ne pas gratter la surface du gel avec un ongle, une brosse, etc.
11. Les disques de massage sont des consommables dont la durée de vie est généralement de 20 à 30 fois. Si les coussinets ne collent pas ou si le stimulateur devient faible, veuillez changer les coussinets à temps.
12. Les piles de ce produit sont des piles polymères intégrées. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez le recharger tous les 6 mois.

Mise en sécurité

1. Ne placez pas l'appareil principal dans un endroit exposé au soleil, à des températures élevées, à l'humidité, à la poussière, au feu ou à des vibrations ou chocs.
2. Veuillez placer l'appareil dans un endroit inaccessible aux enfants.

Nettoyage et Rangement

Conditions environnementales de transport et de stockage :

Température : -20/+60°C,

Humidité : L'humidité ne dépasse pas 85%.

Utilisez un chiffon légèrement humidifié pour nettoyer l'appareil et essuyez-le doucement.

- Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous le nettoyez.
- Ne laissez pas d'eau pénétrer dans l'appareil.

Nettoyage et Rangement du Coussinet

Nettoyage : Après avoir utilisé les coussinets sur votre corps, veuillez déposer un peu d'eau claire sur le côté collant et utiliser le bout des doigts pour le nettoyer doucement.

- Veuillez éteindre l'appareil et déconnecter les coussinets avec les fils avant de nettoyer le coussinet.
- N'utilisez pas d'ongles ou d'autres objets pointus sur le côté collant.
- N'utilisez pas de liquides chimiques sur la face collante.

Stockage : placez les coussinets sur le support son ou placez un film plastique sur le côté collant du coussinet pour conserver l'humidité du gel.

Mise en garde

1. Ne pas conserver l'appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou basses, à l'humidité, au feu, aux vibrations ou aux chocs.
2. Ne pas conserver l'appareil dans des endroits facilement accessibles aux enfants.

Durée de vie des pièces de rechange

Unité de contrôle : 3 ans

Batteries : charge et décharge répétées 500 fois. Les quatre ports de sortie sont tous allumés, utilisent le mode de fréquence le plus élevé, et l'intensité est réglée au maximum (20e vitesse), chaque charge complète peut être utilisée pendant environ 7,3 heures.

Coussinets : 20 à 30 fois, selon les personnes.

RANGEMENT

1. En cas d'interruption prolongée du traitement, rangez l'appareil dans une pièce fraîche et sèche, protégez-le de la chaleur, du soleil et de l'humidité et retirez la batterie pour éviter qu'elle ne coule.
2. Conservez l'appareil dans un endroit frais et bien ventilé.
3. Ne posez jamais d'objets lourds sur l'appareil.

DISPOSITION

Veuillez mettre l'appareil au rebut conformément à la législation en vigueur dans votre région.

6. DEPANNAGE

Si votre appareil ne semble pas fonctionner correctement, consultez le tableau ci-dessous pour déterminer ce qui ne va pas. Si aucune de ces mesures ne permet de résoudre le problème, l'appareil doit être réparé.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Un coussinet semble plus fort que l'autre	Cette réaction est normale. Les différentes zones de votre corps réagiront différemment.	Il n'y a rien à faire. Assurez-vous que les coussinets sont humides et qu'ils établissent un bon contact.
Pendant le massage, la peau ressent une sensation de brûlure douloureuse ou la stimulation s'affaiblit.	Les coussinets de gel adhésif n'adhèrent pas fermement à la peau. Les coussinets de gel sont trop secs, les fils sont endommagés.	Appliquez quelques gouttes d'eau sur la surface adhésive de chaque coussinet et veillez à ce que les coussinets soient fermement pressés sur la peau pendant l'application. Utilisez un nouveau jeu de coussinets. Utilisez un nouveau jeu de fils.
L'unité est allumée, mais aucune sensation n'est ressentie dans les coussinets.	Les deux coussinets ne sont pas fermement appliqués sur la peau. La connexion est lâche. Le niveau d'intensité doit être augmenté	Assurez-vous que les deux coussinets sont fermement appuyés sur la peau (deux coussinets au minimum). Un seul coussinet ne fonctionnera pas. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien établies entre l'appareil et les fils, et entre les fils et les coussinets. Augmentez le niveau d'intensité.
Coussinets de gel adhésifs Ne collent pas à la peau, même après avoir nettoyé et humidifié le coussinet de gel.	Le matériau adhésif s'est épuisé.	Les coussinets de gel adhésif doivent être remplacés.
L'appareil ne s'allume pas ou l'écran est faible.	La batterie est faible	Rechargez la batterie
L'appareil ne se charge pas	Adaptateur mural ou cordon USB.	Chargez votre appareil à l'aide du cordon USB uniquement sur n'importe quelle prise de courant USB.C
Stimulation uniquement sur un canal	<ul style="list-style-type: none">• Votre appareil dispose du canal indépendant AB• Mauvais fil	<ul style="list-style-type: none">• Essayez de régler le mode et/ou l'intensité sur chaque canal.• Essayez d'utiliser un nouveau jeu de fils

Avis de non-responsabilité médicale

Toutes les informations sont destinées à votre connaissance générale uniquement et ne remplacent pas un avis médical ou un traitement pour des conditions médicales spécifiques. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas vous donner de conseils médicaux. Vous devez consulter rapidement un médecin pour tout problème de santé spécifique et consulter votre fournisseur de soins de santé avant d'acheter un ou plusieurs produits. Les informations contenues dans le présent document sont destinées à permettre aux consommateurs de comprendre et de connaître les produits proposés.

Ces informations ne doivent pas être considérées comme complètes et ne doivent pas remplacer une visite, un appel, une consultation ou un conseil de votre prestataire de soins de santé. Si vous avez des questions relatives à la santé, veuillez appeler ou consulter rapidement votre prestataire de soins. Vous ne devez jamais ignorer un avis médical ou tarder à le demander en raison de ce que vous avez lu ici.

Garantie

Cher client,

Merci d'avoir acheté notre produit et bienvenue dans la famille Maytoyo !

Maytoyo s'engage à être un vendeur mature et excellent avec une bonne réputation et un sens élevé des responsabilités. Nous faisons de notre mieux pour fournir à tous les acheteurs des produits de haute qualité et une équipe après-vente professionnelle. Nous sommes très fiers de vous servir en tant que client et nous espérons que vous tirerez le meilleur parti de votre achat. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter. Votre satisfaction est notre priorité !

Contact

Nom du fabricant : Shenzhen Jian Feng Electronic Technology Co. Ltd.

Adresse : #902,903 Jialingyu Industrial Building, Dapu Road, Houting Village, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

Code postal : 518104

E-mail : support@maytoyo.com

Web : <http://www.maytoyo.com>

Visitez le lien ou scannez le code QR et complétez l'enregistrement.



PROLONGEZ VOTRE GARANTIE DE 2 ANS

